

INNOVACIÓN

N 1108 PROGRESSIVE

Permite aplicar diferentes ondas y programas EN 2 GRUPOS MUSCULARES AL MISMO TIEMPO...



O. RUSAS + CUADRADAS + T.E.N.S. + Interferenciales



EQUIPO BIFÁSICO - CORPORAL
54
PROGRAMAS

2 AÑOS DE GARANTÍA
+CAPACITACIÓN

EQUIPO PROFESIONAL

- CORRIENTES BIFÁSICAS.
- 8 CANALES INDEPENDIENTES.
- 2 COMANDOS.
- 2 PANTALLAS DIGITALES.
- CONTROL DE ANCHO DE PULSO.
- ARRANQUE Y FINALIZACIÓN EN RAMPA.
- ELECTRODOS 100% CONDUCTIVOS.
- 34 PROGRAMAS PREESTABLECIDOS
- 20 PROGRAMAS PERSONALIZABLES

N 1108 PROGRESSIVE - DOBLE COMANDO

El equipo N 1108 PROGRESSIVE® es el más avanzado de la línea de equipos para electroestimulación estética, fisioterapia, deportología y rehabilitación.

Posee la versatilidad de trabajar con 8 canales de salidas o seleccionar su desempeño para trabajar 4 canales en un grupo muscular y los otros 4 canales para otro grupo muscular, en forma conjunta, al mismo tiempo y con diferentes ondas y programas.

Esta función, única en el mercado, permite al profesional trabajar diferentes zonas del cuerpo del paciente, al mismo tiempo, atendiendo la necesidad de la terapia a aplicar en cada zona corporal.

TECNOLOGÍA MICROELECTRÓNICA.

Sus 8 canales operan en forma independiente o conjunta, con un transformador de aislación independiente por canal.

Con 54 programas especialmente desarrollados por profesionales le brindan a N 1108 PROGRESSIVE® todas las posibilidades para la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos utilizando Ondas Rusas, Cuadradas y T.E.N.S. con **inicio y finalización en rampa**.

Además puede **variar de forma rápida y segura** todos los parámetros, generar y grabar nuevos programas y así tener un seguimiento de cada paciente.

NOTO
TECNOLOGÍA PARA CONFIAR

NOTO plantea un rumbo diferente donde la combinación de terapias, la incorporación de tecnología de vanguardia y la utilización de materiales y productos de primera calidad son fundamentales para la obtención de resultados visibles, efectivos y duraderos.

ONDAS RUSAS

Se trata de corrientes de media frecuencia modulada en señales de baja frecuencia. Su frecuencia media tiene como objetivo la disminución de la resistencia o impedancia cutánea, permitiendo que la de baja frecuencia actúe sobre la musculatura. El objetivo de estas corrientes se centra en la tonificación muscular o en la modelación de los contornos corporales. El N 1108 cuenta con la posibilidad de trabajar este tipo de onda en forma bipolar y tetrapolar interferencial.

T.E.N.S.

Los programas T.E.N.S. utilizan los mecanismos propios del sistema nervioso central para aplacar los dolores crónicos y agudos. La ventaja principal de aplicar ondas T.E.N.S. es la disminución del dolor, generando un alivio de forma inmediata y sin efectos colaterales.

ONDAS CUADRADAS.

Se presentan en forma de pulsos de baja y media frecuencia. Las ondas cuadradas son las más energéticas de las corrientes rítmicas.

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Flaccidez y modelación de contornos musculares.
- Glúteos hipertrofiados y erguidos.
- Hipertrofia muscular progresiva.
- Atrofia por desuso.
- Fortalecimiento en procesos post quirúrgicos.
- Rehabilitación deportiva.

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Lesiones de los nervios periféricos.
- Lesiones de compresión nerviosa y distrofia simpática refleja (síndrome del túnel carpiano).
- Dolor del muñón y/o dolor fantasma de miembros.
- Neuralgia post herpética.
- Dolor de espalda y cuello

PRINCIPALES INDICACIONES:

- Deportología.
- Modelación.
- Firmeza muscular.
- Tonificación.
- Fortalecimiento.
- Fuerza y Resistencia.
- Modelación corporal.

EL EQUIPO N 1108 PROGRESSIVE CUENTA CON:



8 Electrodes GRANDES

8 Electrodes CHICOS

6 Bandas elásticas

8 Cables conectores


1 Manual de uso

DATOS TÉCNICOS N 1108 PROGRESSIVE:

FABRICADO POR:	NOTO GROUP S.A.
PAÍS:	ARGENTINA
NOMBRE DEL PRODUCTO:	N 1108 PROGRESSIVE
ANCHO:	350 MM
LONGITUD:	310 MM
ALTURA:	160 MM-75 MM
PESO:	3,1 KG
TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN:	98 A 240 VAC 50/60 HZ
POTENCIA:	21 WATT
FUSIBLE:	1 AMPER CORTE RÁPIDO
FUNCIONAMIENTO:	MICROCONTROLADOR
FORMAS DE ONDA:	ONDAS RUSAS, T.E.N.S Y ONDAS CUADRADAS
CORRIENTE MÁXIMA:	120 MA. Impedancia 1K
CANTIDAD DE CANALES:	8 CORPORALES INDEPENDIENTES AISLADOS

PROGRAMAS:	34 PREESTABLECIDOS
TEMPORIZADOR (TIEMPO):	A 30 MINUTOS
CONTRACCIÓN:	2 A 15 SEGUNDOS
PAUSA:	2 A 50 SEGUNDOS
FRECUENCIA:	2 A 150 HZ
RELACIÓN:	1:1- 2:1- 4:1
RAMPA DE ASCENSO:	1 SEGUNDO
RAMPA DE DESCENSO:	1 SEGUNDO
SECUENCIAS:	1, 2, 3, 4 o 5

NOTA: LAS ESPECIFICACIONES DEL EQUIPO PUEDEN VARIAR SIN PREVIO AVISO

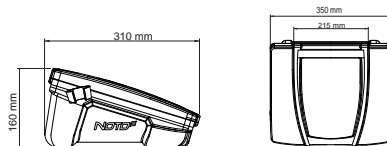

Frecuencia Portadora de 2500 HZ. ONDAS RUSAS

NOTO respalda a todos sus clientes con un conjunto de herramientas disponibles en todo momento.

Herramientas como capacitación, servicio técnico post venta y repuestos asegurados. Todo esto con el objetivo de lograr que los equipos Noto sean siempre su mejor opción

Otros equipos NOTO:

N 1800 - Microdermoabrasión + Electroporación con sistema "ID".
BIMAX - Radiofrecuencia bipolar con sistema de campos cruzados.